

# Promozione | 1/2012



## Con KOMET è meglio!

### LD 0687

Punte soniche sec. il Dr. Massironi  
per il riposizionamento del margine cervicale

Assoluto controllo operativo e rispetto dei tessuti molli.  
Impiego su manipolo sonico SF1LM KOMET  
Si consiglia l'impiego a pressione di contatto (max 2 N)  
sotto raffreddamento.

Il riposizionamento si ottiene regolando il manipolo  
SF1LM a livello 2. A livello 3 solo per brevi momenti!  
La finitura si ottiene regolando il manipolo SF1LM a  
livello 1.



SF979.000.012



SF979.000.014



SF979.000.016



► Prezzo promozionale

**420 €** + IVA

invece di 591,76 € + IVA

# Sort 056

**SORT 056 composto da:**

**1 x pietra di pulizia diamantate 9750**

**1 x Kit LD0346**

Chamfer Modificato

sec. Dr. Domenico Massironi

Preparazione a chamfer modificato in versione cilindrica e conica.

Pressione operativa 2 N,

opt. 160.000 giri al min.<sup>-1</sup>


Si consiglia di utilizzare manipolo moltiplicatore ad anello rosso; utilizzare lo spray.



► Prezzo promozionale

**110€** + IVA

invece di 158,92 € + IVA

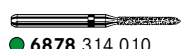

● 6878.314.010



● 2979.314.014



● 2979.314.016



● 8979.314.014



● 8979.314.016



● 2979K.314.021



● S6979K.314.018



● 8979K.314.021



● 8979K.314.018



● 6845KR.314.025




● 8845KR.314.025



● 2379.314.023



● 8379.314.023

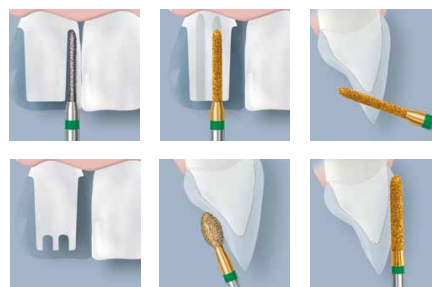

# LD 0347

**Kit per Piccola Chirurgia Orale**

Le frese in CT con taglio incrociato specifico per chirurgia, in grado di lavorare dolcemente sul dente e sull'osso.

Pressione operativa 1 N,

opt. 10.000 giri al min.<sup>-1</sup>,

si consiglia l'utilizzo del manipolo moltiplicatore anello rosso.

**Piccola Chirurgia Orale - H254E.314.012**



6 x ● H254E.314.012

**Piccola Chirurgia Orale - H254LE.314.012**



6 x ● H254LE.314.012



► Prezzo promozionale

**190€** + IVA

invece di 288,74 € + IVA

# LD 0334

Escavazione Dentinale  
Controllata con rosette in ZrO<sub>2</sub>

La nuova fresa bianca a pallina, in ceramica, in grado di resistere alla corrosione, biocompatibile, rispettosa della dentina sana.

A livello tattile si percepisce il passaggio dalla dentina cariata alla sana.

Pressione operativa 1N,

○ opt. 1.500 giri al min.<sup>-1</sup>

Si consiglia di utilizzare contrangolo riduttore ad anello verde; utilizzare lo spray.



► Prezzo promozionale

**250 €** + IVA

invece di 353,25 € + IVA

Gambo 204:



● K1SM.204.010

● K1SM.204.012


● K1SM.204.014

● K1SM.204.016

● K1SM.204.018

● K1SM.204.021

Gambo 205:

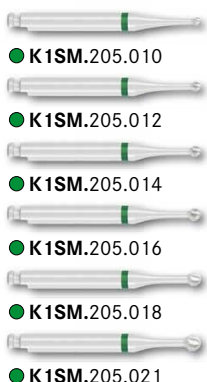

● K1SM.205.010

● K1SM.205.012

● K1SM.205.014

● K1SM.205.016

● K1SM.205.018

● K1SM.205.021

# SORT 062

Fresoni UM per metalli nobili e vili -  
Dentatura Universale

A pressione operativa sostenuta è possibile ottenere una forte asportazione di materiale;

a pressione operativa lieve è possibile ottenere un'ottima superficie rifinita.

Il portastrumenti in plexiglas trasparente art 150.529 consente visuale e facilità di presa insuperabili.



2 x ● H79UM.104.040



5 x ● H129UM.104.023



5 x ● H139UM.104.023



► Prezzo promozionale

**250 €** + IVA

invece di 341,75 € + IVA

# Promozioni 10 + 3

Acquista con la massima libertà strumenti diamantati a grana media o strumenti in tungsteno a taglio semplice per conservativa, protesi, rifinitura, ecc.

A partire da 10 blister puoi sceglierne ancora 3 della stessa categoria di prezzo.

Chiedi al concessionario KOMET di mostrarti le diamantate a grana media e le frese in tungsteno a taglio normale, gli strumenti per il lavoro quotidiano di tutti gli studi.

## Diamantate grana media

Acquista 10 placchette di diamantate in grana media e puoi scegliere ancora 3 in omaggio della stessa categoria di prezzo!



## Carburo di tungsteno taglio normale

Acquista 10 placchette di frese in carburo di tungsteno a taglio normale e puoi scegliere ancora 3 in omaggio della stessa categoria di prezzo!

