

Un brillante lavoro di squadra



Frese a finire a taglio Q e gommini monopassaggio per la lucidatura a specchio dei compositi

Ebbene sì! E' possibile ottenere una lucidatura a specchio in soli due passaggi. Per raggiungere questo obiettivo, prima del passaggio con i nostri gommini di superbrillantatura bisogna contornare e rifinire la superficie del composito con strumenti a finire in carburo di tungsteno multilame. E' più semplice di quanto si pensi. Soprattutto se siete abituati a fare più passaggi con diamantate a grane fini e più passaggi con i gommini di lucidatura.

Impiegando la combinazione frese a finire in tungsteno taglio Q con i nostri nuovi gommini ad un passaggio, noterete da subito il risparmio di tempo e il miglioramento della qualità di brillantatura. I gommini di lucidatura sono impregnati di grano di diamante a grana ultrafine e grazie al legante di tipo silicico risultano essere morbidi e plastici per l'anatomia del dente. Inoltre sono perfettamente termostabili, per cui sterilizzabili senza problemi in autoclave.



Kit 4546