



# Strumenti di lucidatura | biossido di zirconio $ZrO_2$

---



Strumenti di lucidatura per tutte le ceramiche high tech.

I nuovi materiali e le nuove tecniche di produzione richiedono continuamente nuovi strumenti che consentano la lavorazione. Una gamma completa per l'efficace lucidatura di tutte le ceramiche compone questo sistema di lucidatura con due soli passaggi. Questi strumenti di lucidatura si adattano perfettamente alla lavorazione di biossido di zirconio, ossido di alluminio e pressoceramiche. La loro texture elastica risparmia la struttura anatomica dei restauri.

**Vantaggi:**

- una brillantezza naturale in due soli passaggi di lucidatura
- lunga durata ed elevata economicità
- ridotta formazione di polveri di lucidatura
- grazie al codolo dorato e alla differenziazione cromatica è più facile identificare gli strumenti
- blu = prelucidatura
- grigio chiaro = brillantatura

## Utilizzo:

1. Lucidatura efficace con lo strumento len-tiforme 94011C.104.260 e ...

2. ... 94011F.104.260.

3. Prelucidatura con il disco 94013C.104.170.

4. Lucidatura della superficie oclusale con la fiamma 94018C.104.055 o con lo strumento 94027C.900.030.

5. Brillantatura conclusiva con lo strumento 94013F.104.170.

6. Piccole correzioni dei bordi e finitura brillante con lo strumento 94012F.104.110.



## Indicazioni di utilizzo:

- Stupefacenti risultati di lavorazione con un numero di giri pari a  $\odot_{opt.} 6.000 \text{ giri al min.}^{-1}$
- Numero di giri massimo pari a  $\odot_{max.} 10.000 \text{ giri al min.}^{-1}$
- Per risultati di lavorazione ottimali utilizzare entrambi i passaggi di lucidatura

### Prelucidatura:



### Brillantatura:

