





FQ. La via
per l'endodonzia sicura.

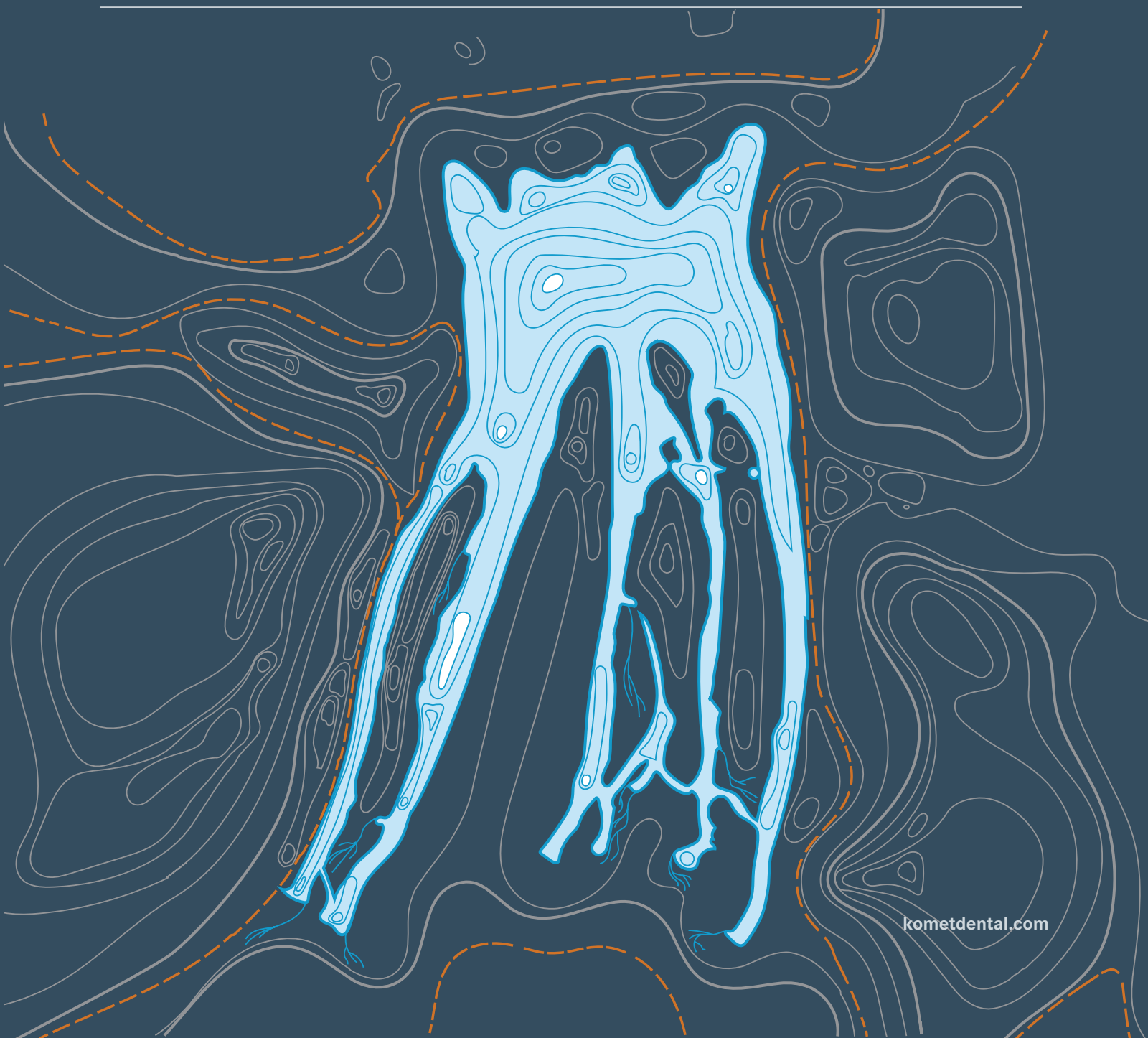

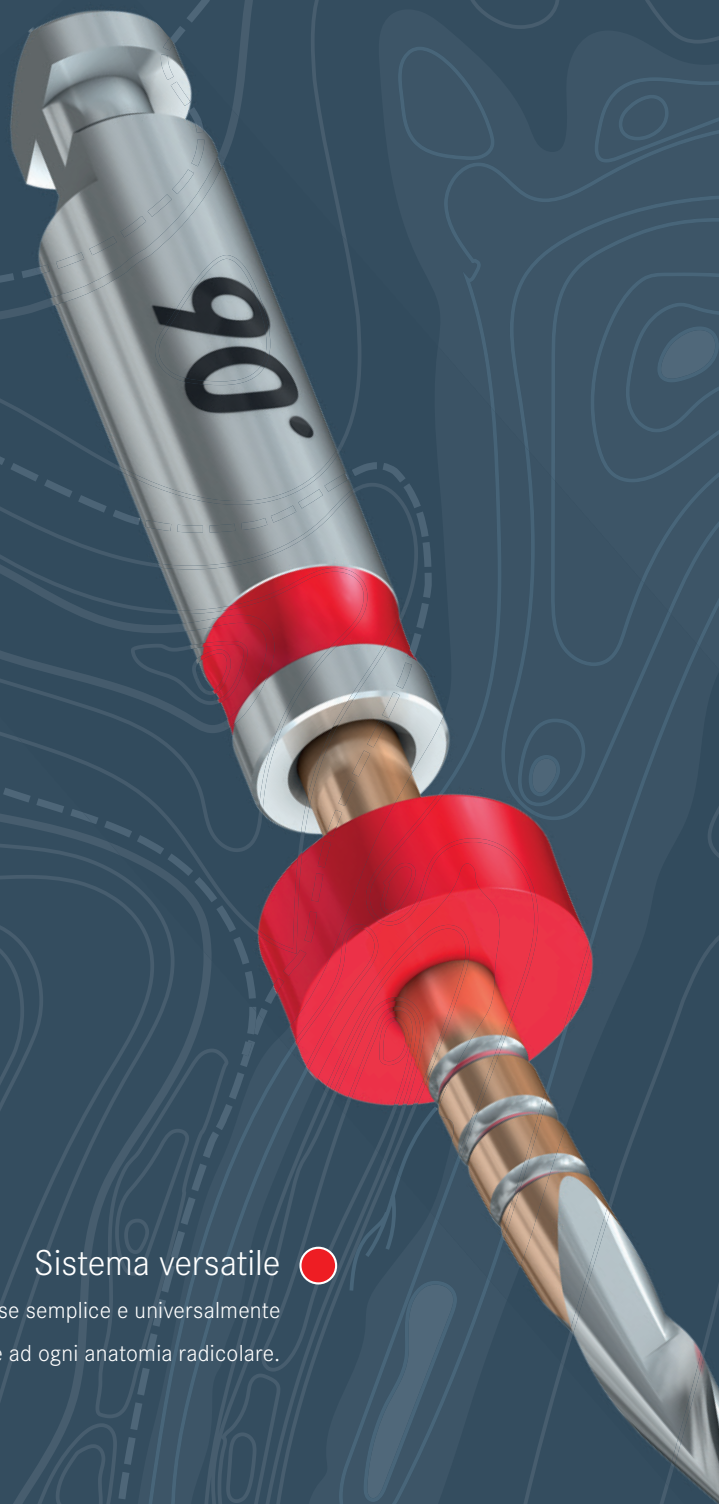

Sistema versatile ●

Sequenza di base semplice e universalmente adattabile ad ogni anatomia radicolare.

Q significa flessibilità ●

Migliore accesso al sistema radicolare, ridotto rischio di blocco nel canale e formazione di "gradini".

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIAO®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MO®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® e SHAX® sono marchi registrati della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® e EndoPilot® sono marchi registrati della Schlumberger GmbH & Co. KG.

I prodotti e le denominazioni riportati nel presente testo sono in parte protetti dal diritto d'autore, dal diritto dei marchi e dai rispettivi brevetti. La mancata apposizione di particolari indicazioni e/o del marchio © non esclude la sussistenza di un'eventuale tutela giuridica.

La presente opera è protetta dal diritto d'autore. Tutti i diritti, ivi compresi quelli di traduzione, riproduzione e duplicazione, totali o parziali, sono riservati. Nessuna parte della presente opera può essere riprodotta o diffusa con un qualsivoglia mezzo (fotocopia, microfilm o qualsiasi altro mezzo) nonché rielaborata con l'ausilio di sistemi elettronici senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Con riserva di modifiche attinenti prodotti e colori.
Non si risponde di eventuali errori di stampa.

Stato: Febbraio 2023

FQ. efficiente, flessibile, affidabile.

Ogni trattamento endodontico è unico, così come FQ: un sistema innovativo, progettato per rendere il trattamento più semplice, efficace e sicuro. È una straordinaria soluzione all-in-one che trasferisce l'esperienza di Komet in una nuova generazione di strumenti. Questo nuovo file rotante in NiTi permette un trattamento efficace e minimamente invasivo di canali radicolari sia complessi che semplici. L'innovativo core a conicità variabile presenta una sezione trasversale a doppia "S", che offre massima flessibilità ed eccellente performance di taglio. I file possono essere precurvati prima dell'utilizzo e tagliano con facilità, garantendo un'esperienza di lavoro piacevole e sicura.

NiTi trattato termicamente.

L'alta resistenza alla fatica ciclica minimizza il rischio di frattura. Grazie alla possibilità di precurvatura del file e alla sua alta flessibilità, l'accesso ai canali radicolari risulta più agevole e riduce il rischio di errori.

Sezione trasversale a doppia "S".

Trattamento efficace grazie alle eccezionali performance di taglio. Il core ristretto del file permette una flessibilità ottimale.

Core a conicità variabile*.

Il core a conicità variabile aumenta la capacità di asportazione. Il tessuto infetto viene asportato dal canale in modo ancora più efficiente e la tempistica della preparazione si riduce.

Grazie al trattamento termico il core a conicità variabile è altamente flessibile.

Il file si adatta anche alle anatomie dei canali più curvi rendendo il trattamento più sicuro.



Ampio spazio di raccolta dei trucioli dentinali per evacuazione ottimale di detriti

Core dello strumento ottimizzato per un'elevata flessibilità

● Sezione trasversale a doppia "S" e core a conicità variabile*

Il tessuto infetto viene rimosso dal canale in modo ancora più efficiente, ottimizzando i tempi del trattamento.

*per strumenti con conicità .06

FQ. Step-by-Step.

Sistematica semplificata.

L'uso di due soli strumenti consente di ottimizzare le fasi iniziali del trattamento canalare. Questo insieme di strumenti,

completo e versatile, permette di assemblare sequenze operative adattabili a ogni esigenza operativa, anche nei canali radicolari anatomicamente complessi.



[01] Accesso all'imbocco canalare con FQ Opener.



[02] Sondaggio con file manuali e creazione di un sentiero di scorrimento con FQ Glider.




[03] Sagomatura del canale con i file FQ Shaping.




Opzionale: Finitura fino alla misura di preparazione desiderata con i file FQ Finishing.


Trattamento di caso clinico di Rafaël Michiels – Hasselt (Belgium)

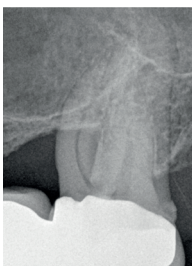

Situazione iniziale

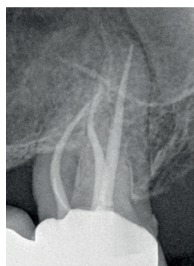

Otturazione

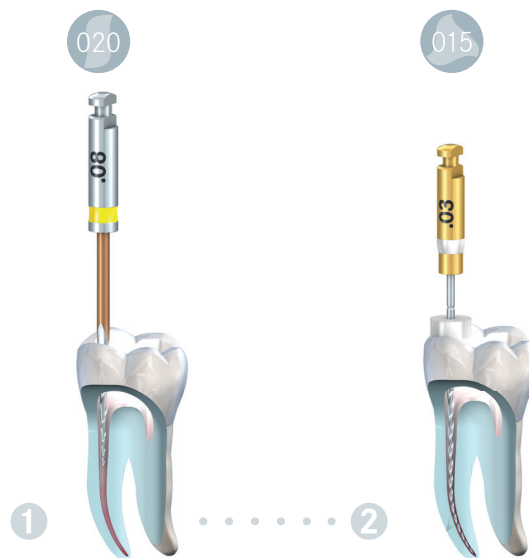

Alesatura iniziale e FQ Opener

Sentiero di scorrimento o FQ Glider

Conicità .04

per essere ancora
meno invasivi

020



025



3

030



035



045



055



Conicità .06

per la maggior parte
dei casi clinici

020



025



3

030



Sequenza basica

Shaping opzionale

Shaping


Finitura opzionale

FQ.

Il sistema.

FQ Opener

- Elimina le interferenze coronali e crea un accesso rettilineo e conservativo.
- Accesso ai canali più ristretti
- Un solo passaggio per un allargamento coronale precoce anche nei canali più calcificati

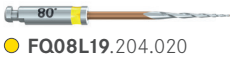

● FQ08L19.204.020

FQ Glider

- Transizione efficace e ottimale ai file Shaping
- Crea un sentiero di scorrimento funzionale e ripetibile
- L'operatore può creare un glide path in modo più predicibile e rapido rispetto alle tecniche manuali



○ FQ03L25.204.015

STERILE R

	Torque [Ncm]
FQ Opener	2,4
FQ Glider	0,8
FQ Taper .04 (020 - 035)	1,8
FQ Taper .06 (020 - 030)	2,4
FQ Taper .04 (045 - 055)	

Velocità [rpm]

300 (max. 500)

FQ Files

con conicità .04



● FQ04L25.204.020



● FQ04L25.204.025



● FQ04L25.204.030



● FQ04L25.204.035



○ FQ04L25.204.045



● FQ04L25.204.055

FQ Files

con conicità .06



● FQ06L25.204.020



● FQ06L25.204.025



● FQ06L25.204.030

Disponibile nelle lunghezze 21mm, 25mm e 31mm (6 file in ogni blister)

FQ Assortimento

SORT207

● FQ08L19.204.020

○ FQ03L25.204.015

● FQ04L25.204.020

● FQ04L25.204.025

● FQ04L25.204.030

● FQ04L25.204.035

FQ Punta di carte

adattate alla preparazione con il sistema FQ classificati e codificati per colore



FQ Punta di guttaperca

Adattate alla preparazione con sistema FQ. Classificate, codificate per colore e radiopache



FQ.

Gli accessori.



97521 Endo Sequencer



BCS1 KometBioSeal
Cemento canalare radicolare



EnGO13 Endo-Motor



EP0014 EndoPilot
con espansioni modulari opzionali

KOMET ITALIA S.r.l. Società Unipersonale

Sede operativa:

Via Gianbattista Morgagni 36 | 37135 Verona VR | T 045 11171911

www.komet.it | info@komet.it

Sede legale:

Via Cernaia 11 | 20121 Milano MI | T 02 67076654

www.kometacademy.it

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) @ komet.italia