


Guida | Spazzolini da laboratorio

Consigli per l'uso efficiente degli spazzolini per lucidatura

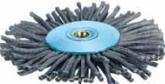

	Setole naturali dolci	Setole naturali medie	Setole naturali rigide	Filo d'acciaio *	Spazzolini SIC *	Fibre di vello *	Feltro	Moscione Cottone
	 9638.104.120	 AR9463.104.190	 9449.900.190 9449.900.220	 9637.900.220	 9452C.900.220	 9485C.104.250	 9629.900.210	 9628.900.220
	 9638.900.190 9638.900.220	 AR9464.104.190	 9451.900.220		 9452M.900.220	 9485M.104.250		 9448.900.220
					 9452F.900.220	 9485F.104.250		



Pasta diamantata per lucidatura

- REF 9300 - D3 (2 - 5 µm)
- REF 9301 - D7 (5 - 10 µm)

Protesi totali e parziali Resine per protesi								
Rivestimenti estetici Resine per rivestimento estetico								
Faccette, rivestimenti estetici, inlay, corone Ceramica								
Inlay, corone, ponti Leghe nobili								
Inlay, corone, ponti Leghe a ridotto contenuto di metalli nobili								
Corone, ponti Leghe vili								
Basi di protesi Scheletrati								
Corone, ponti, basi di protesi Titanio								
Numero di giri consigliato: ○ _{opt} 5.000 - 6.000 giri al min. ⁻¹	Pulizia/prelucidatura						Lucidatura	Lucidatura a specchio

Il mancato rispetto del numero di giri massimo causa un aumento del rischio per la sicurezza e/o l'usura precoce dello strumento!

* Uso senza pasta lucidante

Con riserva di modifiche inerenti i prodotti e i colori.

Komet Italia S.r.l. - Via Fabio Filzi 2 - 20124 Milano - Telefono 02 67076654 - Telefax 02 67479318 - info@komet.it - www.komet.it

© 10/2012 - 410821VO

